

Anleitung Sicherstellung von Haarproben

Video-Anleitung Probenahme:



Örtlichkeit für Probennahme

- Nie an Orten, an denen z.B. mit Pulverproben von Drogen gearbeitet wird

Kopfhaarproben

- Haarbüschel zusammenbinden (siehe Foto, keine Klebestreifen etc. verwenden)
- Haarbüschel am oberen Hinterkopf kopfnah abschneiden (Stoppeln 1 - 2 mm)
- Immer zwei oder drei Haarstränge nah beieinander abschneiden (A und B, evtl. C)
- Einpacken in Folie, kopfnahes Ende oben
- Beschriftung der Probe, z.B. Fixation des Alufolienpäckchens mit Etikette auf Probenhalter
- Probenhalter «Haarasservierungs-Set» vollständig ausfüllen
- Unterschrift Proband/Probandin auf Probenhalter
- Bei kurzen (<1-2 cm) oder kosmetische behandelten Kopfhaaren zusätzlich Körperhaare sicherstellen
- Faustregel Haarwachstum Kopfhaare: 1 cm pro Monat

Körperhaar

- Brust-, Bein- oder Armhaare sicherstellen (Einmalrasierer, nicht bündeln, direkt in separate Alufolie geben), ev. auch Barthaare ≥ 2 cm, **nie** Achselhaare

Auftrag

- Formular «Probenahme und Auftrag für Haaruntersuchungen» vollständig ausfüllen
- Elektronisch beschreibbares Formular <http://www.irm.uzh.ch/de/dienstleistung/ftp/zfh.html>

Haarkosmetik, -behandlung:

- Kosmetik vermerken: Färbung, Bleichung, Mèche, Dauerwelle, Streckung etc.
- Verwendete Haarwasser, Haartinkturen, Lotionen, etc. unbedingt nennen

